









Codice prodotto: SLC5525 DT

Confezione minima di vendita : 10 illuminatori confezionati singolarmente

Classe CE IIA

CND: Z129004

Repertorio: 1759078





Caratteristiche:

- > Sino a 3 ore di illuminazione continua
- > Sterile, monouso, confezionato in doppia busta
- > Luce diretta, nessuna ombra
- Compatibile con divaricatori a lama
- > Fascio di luce indirizzato solo verso la ferita
- > Adesivo tenace ma di facile rimozione
- > Interruttore per la gestione ottimale della batteria
- > Latex free
- ➤ Dimensioni : mm55 x 25
- ➤ Peso : gr. 6



Oplight™

Instruzioni per l'uso:

1. Aprire la busta esterna ed estrarre la busta interna







2. Aprire la busta sterile interna ed estrarre il dispositivo Oplight.








3. Rimuovere la protezione della parte adesiva sul retro di OpLight.







4. Far aderire
Oplight alla
parte liscia
ed asciutta del
retrattore

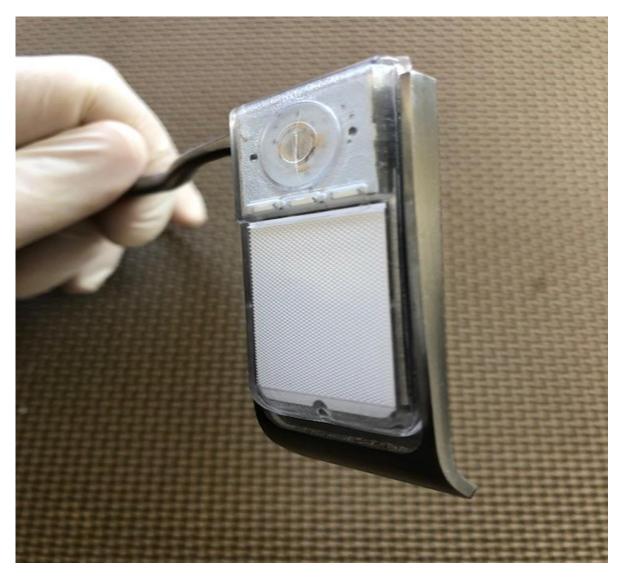





5. Attivare Oplight premendo sul tasto On/Off







6. Rimuovere Oplight ed eliminarlo come da protocollo ospedaliero per i dispositivi medici monouso









via Provinciale 14/16, 25030 Erbusco (BS)

Tel.: +39 030 7760058 - Fax: +39 030 7267051 - Email:

info@cortefrancamedical.com